

## **Accutrend Plus**

*Colesterol, Triglicérides e Lactato.  
Em um único equipamento.*



# Accutrend® Plus

## 3 etapas simples para obter resultados precisos

### Etapa 1

Ligue o equipamento e faça a codificação com a tira código. Após a codificação introduza a tira teste, sem sangue. Um sinal aparecerá no visor indicando a próxima etapa, a aplicação da amostra de sangue.



### Etapa 2

Abra a tampa frontal do equipamento e aplique a gota de sangue capilar (ponta de dedo) na área amarela da tira. Você pode aplicar o sangue com a tira inserida no equipamento ou retirá-la para aplicar o sangue fora e inserir a tira novamente.



### Etapa 3

Feche a tampa e aguarde a contagem regressiva até o aparecimento do resultado no visor.



### Accutrend Plus - Menu de Testes

Testes	mg/dl	Tempo de Medição	Amostra	Volume de Amostra	Temperatura Ideal de Funcionamento
Lactato	20-600	12 seg	- Sangue capilar (ponta de dedo)	15-50 µl	18° - 32°C
Triglicérides	150-300	180 seg	- Sangue capilar (ponta de dedo) pode ser utilizado capilar heparinizado para coleta	15-40 µl	18° - 30°C
Colesterol	70-600	máximo 180 seg	- Sangue capilar (ponta de dedo) pode ser utilizado capilar heparinizado para coleta	10-40 µl	18° - 30°C

Registro ANVISA nº 10287411364.

Todos reagentes comercializados no Brasil estão devidamente registrados. Para obter a relação dos números de registro ligar 0800 77 20 295.

ACCUTREND é uma marca registrada da Roche

©2019 Roche - Março/2019 - MC-BR-00268  
Roche Diagnóstica Brasil Ltda.  
Av. Engenheiro Billings, 1729, prédio 38  
São Paulo, SP  
05321-010, Brasil  
0800 77 20 295