



Guia Rápido de Limpeza

A limpeza do equipamento é pré-requisito para medições precisas.

Frequência de Limpeza

O equipamento deverá ser limpo regularmente, e imediatamente quando ficar sujo.

O que posso usar?

Deve-se ter cuidado com o material usado durante a limpeza para evitar possíveis danos ao equipamento, como a câmara de medição.

- ✓ **Cotonetes normais de algodão sem fibras.**
- ✓ **Pano normal sem fibras.**
- ✓ **Panos para desinfecção normais.**
- ✓ **Sabonete líquido neutro.**
- ✓ **Etanol 70% (álcool 70%).**
- ✓ **Álcool Isopropílico 70%.**
- ✓ **“Bacillol plus” – Uso Profissional.**



Não utilize sprays ou panos desinfetantes ou cotonetes de algodão escorrendo, uma vez que poderá entrar líquido no aparelho e danificá-lo.


Limpeza dos Componentes Externos do Equipamento

- Desligue o Equipamento
- Limpe o a parte externa do equipamento com um pano de algodão sem fibras, levemente umedecido.

Limpeza dos Componentes Internos do Equipamento



1 Abra a tampa da câmara de medição.

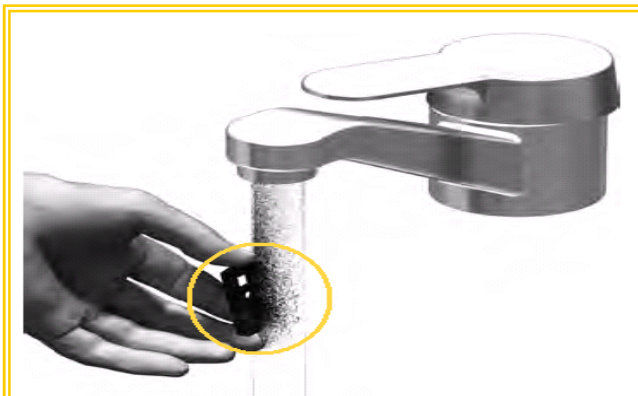


2 Retire a guia de tiras teste empurrando-a ligeiramente em direção ao monitor do equipamento levantando-a em seguida



3 Enxague a guia de tiras teste (separada do equipamento) com água quente corrente.



4 Seque a guia de tiras teste de medição com pano limpo.

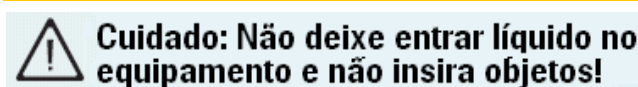

5 Limpe as áreas de fácil acesso do sistema de leitura óptica com um pano ou cotonete umedecido.

6 Deixe o equipamento secar bem. A tampa da câmara de medição só deve ser colocada com o equipamento bem seco.

7 Empurre a extremidade frontal da guia de tiras teste levemente para baixo até sentir um clique.

8 Feche a tampa da câmara de medição.

PRONTO!



Cuidado: Não deixe entrar líquido no equipamento e não insira objetos!